

exeol surf optimal

Détergent désinfectant des surfaces sans alcool


- Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.




SURFACES

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.
⚠ **exeol surf optimal** s'utilise non dilué.


Flacon 750 mL spray

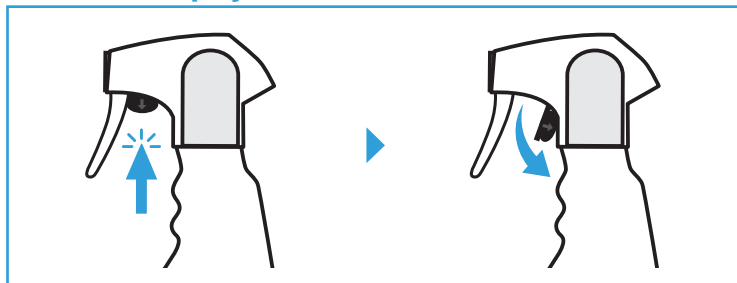


- 1** Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse. Déverrouiller la sécurité du spray.

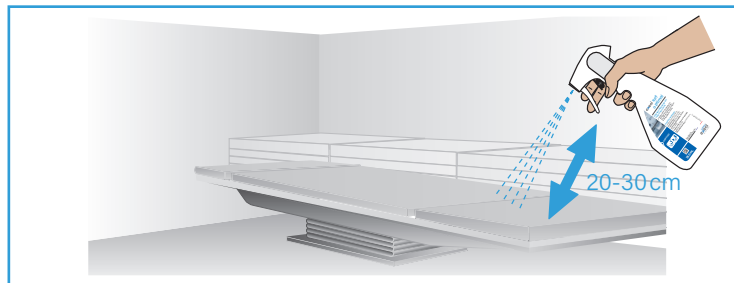


- 2** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 6 \text{ mL/m}^2$, à 20-30 cm de la surface).

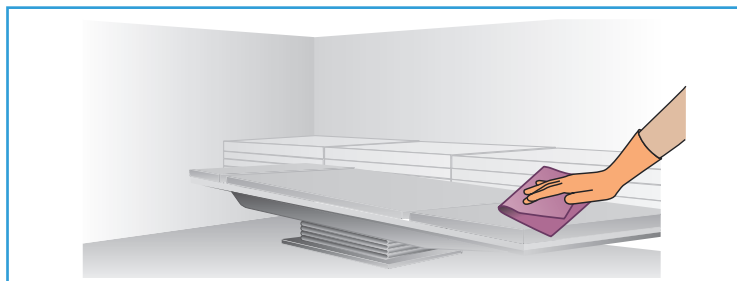


- 3** Nettoyer la surface par essuyage.

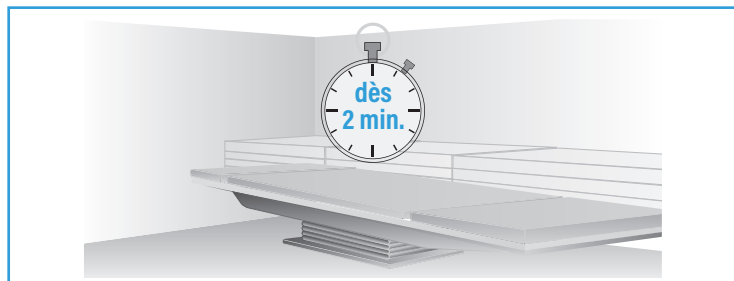

- 4** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.

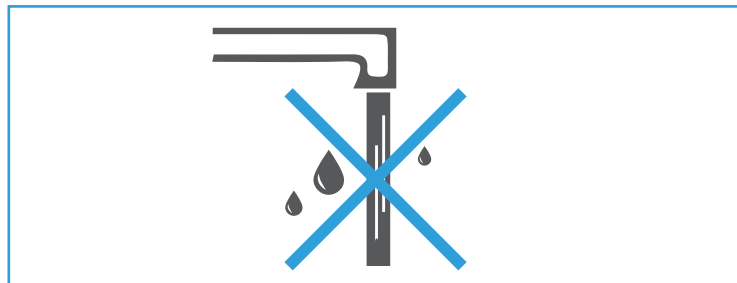

- 5** Ne pas rincer (*excepté les surfaces en contact direct avec la peau).

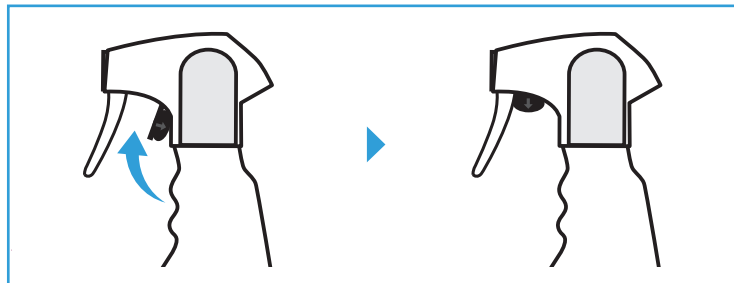

- 6** Verrouiller la sécurité après utilisation.

Utiliser les produits biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Répéter l'opération et désinfection chaque fois que nécessaire.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol

UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible
sur www.exeol.fr



Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr