

désinfection

Fiche technique

Primactyl spray

Désinfectant de contact alimentaire

Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres...
S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables... Agréablement parfumé à la menthe. Ne laisse aucune trace sur le support.
Bactéricide selon la norme EN 1276. Actif sur HIV1, Hépatite B et H1N1
(voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes).

Mode d'emploi

S'utilise pur. Temps de contact :
30 secondes à 30 minutes.

En milieu hospitalier : pulvériser sur la surface à nettoyer et à désinfecter, puis laisser sécher.

Pour le mobilier : pulvériser la surface et essuyer si nécessaire. Le rinçage est inutile.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L,
carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide
- pH : non mesurable
- Densité : 0,95 - 0,97

Précautions

Éviter les projections oculaires
et le contact avec l'épiderme.
Ne pas mélanger avec d'autres produits antiseptiques.

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Liquide inflammable, Catégorie 3.
Irritation oculaire, Catégorie 2.

Produit biocide TP 2

Substances actives biocides : chlorure de didecylmethyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 2,5 g/l -
éthanol, CAS : 64-17-5, 120 g/l, propane-2-ol,
CAS : 67-63-0, 101 g/l.

Date limite d'utilisation optimale :

24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande
au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

15-07-2015 Ind. 13 ■

SANS
VLER*



* Sans Valeur Limite d'Exposition Réglementaire.



Z.I. La Croix-St-Pierre - 19800 EYREIN - Tél. 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

**Propriétés
microbiologiques**

Primactyl spray

NORME

EN 1276

en conditions de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

**EFFICACITE
100% (pur)**

NORME

Virucide

SOUCHES

HIV1

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 min

**EFFICACITE
100% (pur)**

NORME

Virucide

en conditions de propreté

SOUCHES

Hépatite B

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 min

**EFFICACITE
100% (pur)**

